

Blutdruckmessgerät

- 1 Packen Sie das Blutdruckmessgerät aus
- 2 Legen Sie die mitgelieferten Batterien auf der Rückseite des Geräts ein. Das Gerät schaltet sich daraufhin automatisch ein
- 3 Sollte sich das Gerät aufgrund fehlender Eingaben wieder ausschalten, können Sie das Gerät erneut mit eingelegten Batterien starten, indem Sie lange Zeit auf die Ein/Aus-Taste drücken
- 4 Bestätigen Sie im ersten Schritt die Zeitanzeige „24h“ mit der Ein/Aus-Taste
- 5 Wählen Sie die Jahreszahl mit „M1“ und „M2“ aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Ein/Aus-Taste
- 6 Wählen Sie den Monat und dann den Tag mit „M1“ und „M2“ aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Ein/Aus-Taste. Der Monat ist hierbei die erste Eingabemöglichkeit, danach folgt der jeweilige Tag
- 7 Wählen Sie nun die Uhrzeit mit „M1“ und „M2“ aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der Ein/Aus-Taste
- 8 Nun erscheint auf Ihrem Gerät „bt“ für Bluetooth. Bestätigen Sie dies ebenfalls mit der Ein/Aus-Taste



Mit der App verbinden

- 1 Registrieren Sie sich in der App ProHerz. Sollten Sie bereits registriert sein, melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an
- 2 Tippen Sie in der Navigation am unteren Rand des Bildschirms auf „Mehr“
- 3 Wählen Sie in der Liste „Messgeräte“ aus
- 4 Wählen Sie das Blutdruckmessgerät aus
- 5 Befolgen Sie die Schritte in der App zur Geräteverbindung

Pulsoxymeter

- 1 Packen Sie das Pulsoxymeter aus
- 2 Legen Sie die mitgelieferten Batterien auf der Rückseite des Geräts ein
- 3 Warten Sie, bis sich das Gerät wieder ausgeschaltet hat



Mit der App verbinden

- 1 Registrieren Sie sich in der App ProHerz. Sollten Sie bereits registriert sein, melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an
- 2 Tippen Sie in der Navigation am unteren Rand des Bildschirms auf „Mehr“
- 3 Wählen Sie in der Liste „Messgeräte“ aus
- 4 Wählen Sie das Pulsoxymeter aus
- 5 Befolgen Sie die Schritte in der App zur Geräteverbindung


Thermometer

- 1 Packen Sie das Thermometer aus
- 2 Schalten Sie das Thermometer durch langes Drücken der Taste ein, führen Sie die Messung durch
- 3 Registrieren Sie sich in der App ProHerz. Sollten Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an
- 4 Wählen Sie in der App „Übersicht“ und anschließend die Kachel „Temperatur“ aus
- 5 Tippen Sie auf „Messung durchführen“
- 6 Geben Sie den gemessenen Wert manuell ein



Waage

- 1 Packen Sie die Waage aus
- 2 Legen Sie die mitgelieferten Batterien auf der Rückseite des Geräts ein

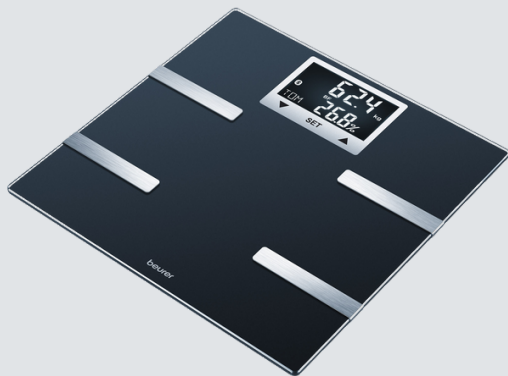

Mit der App verbinden

- 1 Registrieren Sie sich in der App ProHerz. Sollten Sie bereits registriert sein, melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an
- 2 Tippen Sie in der Navigation am unteren Rand des Bildschirms auf „Mehr“
- 3 Wählen Sie in der Liste „Messgeräte“ aus
- 4 Wählen Sie die Waage aus
- 5 Befolgen Sie die Schritte in der App zur Geräteverbindung